





Маска для детей Маска для взрослых

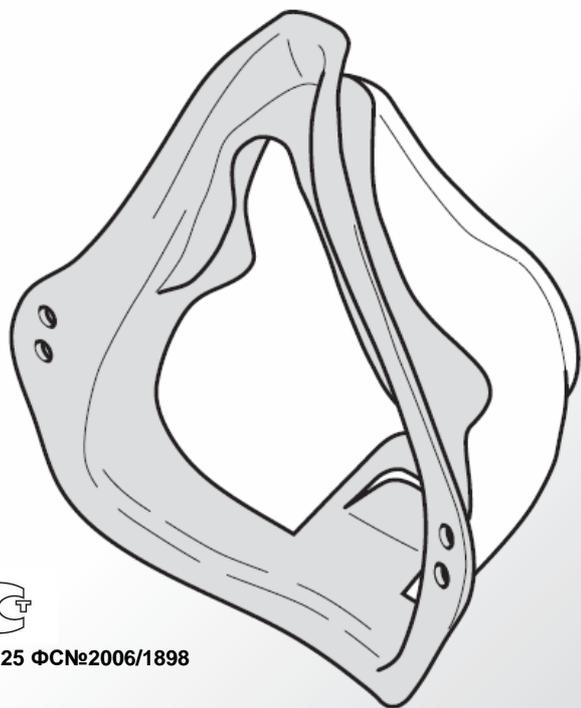

ИМ 25 ФС№2006/1898

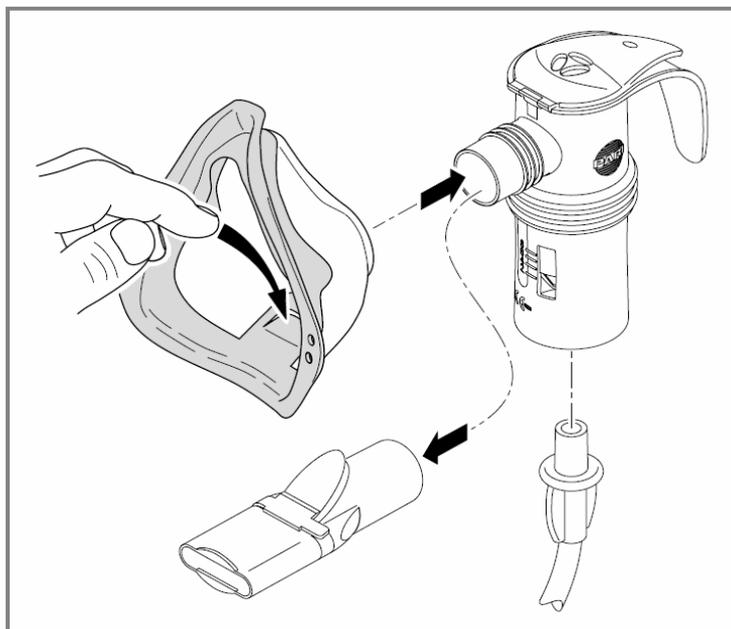

© 2009 PARI GmbH Специалисты в эффективной ингаляции

Специалисты в эффективной ингаляции



PARI GmbH, Германия

Moosstasse 3 • D-82319 Starnberg • Germany
Tel.: +49 (8151) 279-0 • Fax: +49 (8151) 279-101
E-Mail: info@pari.de • http://www.pari.de

Представительство в России и импортер:
ООО "ПАРИ синергия в медицине"

119270, Москва, а/я 54
Тел./факс: +7 (495) 981-88-60
E-Mail: pari-synergy@mail.ru • http://www.pari.com.ru

Сделано в Германии

Маска для детей (подходит для использования у детей приблизительно от 4 лет) и маска для взрослых с мягким уплотнителем совместно с небулайзерами ПАРИ (за исключением ПАРИ ТИА небулайзера) позволяет проводить высокоэффективную ингаляционную терапию у детей и взрослых, которые в силу нежелания или не имея возможности не могут использовать мундштук.



- Пожалуйста, ознакомьтесь также с Инструкцией по эксплуатации применяемого небулайзера ПАРИ. Для соблюдения требований по гигиене следуйте указаниям, данным в Инструкции по эксплуатации небулайзера ПАРИ в главе «Гигиена» (использование одним пациентом).
- Эластичный ремешок, идущий в комплекте с маской для ее фиксации, не следует дезинфицировать или стерилизовать.
- **Перед использованием маски необходимо убедиться, что клапан выдоха, закрепленный на вашей маске, расположен снаружи. При необходимости протолкните его легким надавливанием изнутри.**
- Маска не подлежит термической стерилизации.