

feellife

НАЗАЛЬНЫЙ ДУШ Air Flow 11



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание

1. Описание устройства	4
2. Информация об устройстве	5
2.1 Технические характеристики	5
2.2 Описание сигналов индикатора	6
3. Проверка устройства	7
4. Использование устройства	7
5. Очистка и дезинфекция	11
5.1 Дезинфекция кипячением	12
6. Предупреждения	13
7. Гарантийные обязательства	14
8. Расшифровка символов с упаковки и этикетки	14
9. Комплект поставки	15

1. Описание устройства

Назальный душ Air Flow 11 предназначен для промывания носа. При промывании носовых ходов происходит увлажнение слизистой оболочки и очищение носа.

Промывание носовой полости применяется при:

- частых насморках;
- склонности к простудным заболеваниям;
- сухости носа и твердых корочек на слизистой оболочке;
- сильном загрязнении частицами пыли и грязи;
- аллергии на пыльцу;
- хронических воспалительных заболеваниях носа и придаточных пазух;
- а так же после оперативного вмешательства в область носа и придаточных пазух.

Назальный душ Air Flow 11 состоит из основного блока с кнопкой включения/переключения режимов орошения и промывочной головки (включает в себя резервуар для раствора, сопло-распылитель, насадку для носа и крышку).

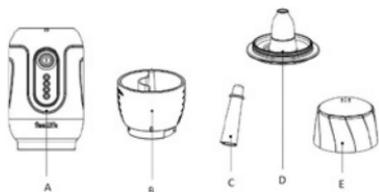


Рисунок 1. Комплект поставки

A	Основной блок с переключателем режимов орошения
B	Резервуар для раствора
C	Сопло-распылитель
D	Насадка для носа
E	Крышка

2. Информация об устройстве

2.1 Технические характеристики

Наименование товара	Назальный душ
Модель	Air Flow 11
Источник питания	DC 3,7В (литиевая батарея) или USB-кабель DC 5,0В, 1А с адаптером переменного тока
Потребляемая мощность	< 6,0 Вт
Режимы работы:	
- Высокая скорость распыления	10 мл/мин (±3 мл/мин)
- Низкая скорость распыления	7 мл/мин (±3 мл/мин)
- Высокая скорость распыления высокочастотным импульсом	9 мл/мин (±3 мл/мин) (пульсация 45 Гц)
- Низкая скорость распыления с высокочастотным импульсом	5 мл/мин (±3 мл/мин) (интервальное распыление)
Непрерывное время работы	>30 минут
Емкость резервуара для раствора	25 мл
Вес (г)	210,8 г (с аккумуляторной батареей)
Размер (мм)	Диаметр: 50 Высота: 166,5

Условия эксплуатации	Температура: +5°C ~ +40°C Относительная влажность: 15%~80% R.H. Атмосферное давление: 86 кПа~106 кПа
Условия хранения/ транспортировки	Температура: -20°C ~+55°C Относительная влажность: 10%~93% R.H. Атмосферное давление: 70 кПа~106 кПа
Ожидаемый срок службы	Срок службы основного устройства – 3 года, промывочной головки – 12 месяцев. Срок службы батареи может превышать 300 циклов.

2.2 Описание сигналов индикатора

Зеленый индикатор светит постоянно	Прибор готов к работе
Синий индикатор мигает 5 раз	Индикация низкого заряда батареи
Мерцание синего индикатора	Идёт зарядка батареи
Синий индикатор светит постоянно	Батарея полностью заряжена

3. Проверка устройства

Убедитесь, что упаковка устройства не повреждена, аккуратно извлеките устройство и принадлежности для проверки:

1. Основной блок и принадлежности не имеют внешних повреждений.
2. В наличии все принадлежности, указанные в комплекте поставки.
3. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство (зеленый индикатор указывает на готовность к работе). После завершения подтверждения подготовьте подключение аксессуара. Сохраните упаковку для дальнейшей транспортировки или хранения.

4. Использование устройства

1. Перед использованием очистите и продезинфицируйте все компоненты, такие как насадка для носа и резервуар для раствора. Мы рекомендуем использовать насадку для носа одним пользователем. В наличии 2 насадки разных размеров (взрослая и детская).



Рисунок 2. Детская и взрослая насадка

2. Разместите назальный душ и все аксессуары рядом с раковиной или умывальником, чтобы ими было удобно пользоваться.
3. Заполнение раствором: снимите промывочную головку, поворачивая её, наполните резервуар (отсек резервуара с трубкой, как показано на рисунке 3) раствором для промывания носа (не менее 2 мл, не более 25 мл) и установите промывочную головку обратно на основной блок. Можно использовать физ.раствор (раствор 0,9% натрия хлорид). Мы рекомендуем вам не использовать домашние солевые смеси

для промывания носа, так как они могут иметь неточную концентрацию и вызывать дискомфорт, такой как ощущение жжения, или даже заложенность носа.



Рисунок 3. Процедура заполнения

4. Наклоните голову над умывальником. Приставьте носовую насадку прямо к ноздре. Держите рот открытым во время промывания. Продолжайте дышать нормально и сохраняйте спокойствие во время процедуры. Не глотайте и не сплевывайте во время промывания.



Рисунок 4. Процедура промывания

5. Выберите желаемый режим: продолжительным нажатием на кнопку на основном блоке включите устройство. Затем с помощью краткого нажатия кнопки питания установите желаемую скорость распыления. Мы рекомендуем начинать с самой низкой скорости. При активации устройство перейдет в режим “Низкая скорость распыления”. Короткое нажатие

на выключатель питания переключает режимы работы устройства. При установке соответствующего режима загорается один из зеленых индикаторов под кнопкой включения.

6. Использованный раствор будет стекать обратно в резервуар для раствора (в отсек резервуара без трубки). После процедуры следует слить использованный раствор. Обычно для очистки носовой полости требуется 10-25 мл раствора. Вы можете отрегулировать его объем в соответствии с Вашим состоянием и рекомендациями врача. Промойте оба носовых хода, как указано выше. После процедуры нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить устройство. Вылейте остатки раствора из резервуара (показано на рисунке 5).



Рисунок 5. Удаление остатков раствора

7. После выполнения всех действий используйте чистую салфетку, чтобы аккуратно удалить остатки раствора из носовой полости. Если возможно, один или два раза высморкайтесь. Это поможет очистить область в задней части носовой полости. Как правило, жидкость из ваших носовых пазух вытечет примерно через 20 минут, когда активизируется реснитчатый эпителий носа.

Примечание:

1) Температура раствора для промывания носа должна быть умеренной (лучше всего 15°C~35°C). Рекомендуется использовать устройство в помещении при температуре 18°C~35°C.

- 2) *Пожалуйста, не используйте для промывания носа жидкость с низкой (<10°C) или высокой температурой (>40°C).*
- 3) *После использования нажмите кнопку питания на передней панели основного блока, чтобы выключить устройство. После выключения вылейте остатки жидкости, очистите и продезинфицируйте устройство, и подготовьте его к следующему использованию.*

8. Источник питания

Устройство оснащено USB-кабелем для зарядки. В комплект поставки не входит сетевой кабель с вилкой для розетки. Пожалуйста, используйте сетевой кабель (выход: DC 5,0 В 1,0 А) для зарядки.

Это устройство оснащено перезаряжаемой литиевой батареей. Когда батарея заряжается, мигает синий индикатор.

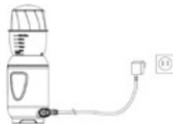


Рисунок 6. Подключение источника питания

⚠ Предупреждение:

По окончании срока службы утилизируйте прибор в соответствии с местными экологическими нормами, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.

Аккумуляторные батареи не должны заменяться пользователем, их должен заменять только производитель.

Неправильное подключение или замена батареей может привести к перегреву, возгоранию или взрыву.

5. Очистка и дезинфекция

Перед и после использования обязательно очистите и продезинфицируйте все необходимые компоненты. Насадка для носа рассчитана на одного пользователя.

- Наполните резервуар для раствора чистой водой, включите прибор и смойте остатки раствора.
- Снимите резервуар для раствора, насадку для носа и крышку с основного блока. Поместите все эти детали в теплую водопроводную воду с небольшим количеством жидкости для мытья посуды не менее чем на 5 мин. При необходимости используйте чистую щетку, чтобы удалить грязь (щетка должна использоваться исключительно для этой цели).
- Тщательно промойте все детали промывочной головки в проточной воде.
- Вы можете быстрее удалить лишнюю воду, встряхивая все детали. Тщательно высушите их.
- Протирайте основной блок прибора сухой мягкой тканью.
- Храните устройство в сухом и чистом помещении, чтобы избежать загрязнения.
- При регулярном использовании прибора проводите дезинфекцию каждые 1-2 недели.

⚠ Осторожно:

Продолжайте заряжать прибор каждый месяц, если срок хранения превышает один месяц. Если литиевая батарея заряжена, не разбирайте ее самостоятельно.

Перед зарядкой убедитесь, что розетка подключена нормально.

Этот прибор заряжается независимо не заряжайте его с помощью какого-либо другого электронного оборудования.

Это устройство нельзя использовать во время зарядки батареи.

5.1 Дезинфекция кипячением

Опустите детали промывочной головки назального душа в кипящую воду на 5 минут. Не оставляйте детали в кипящей воде без присмотра. Детали не должны соприкасаться с дном, в кастрюле должно быть достаточно воды. После кипячения детали следует остудить и просушить.

Осторожно:

Не используйте для дезинфекции высококонцентрированный отбеливатель, так как это может повредить промывочную головку.

Осторожно:

1. Класс водонепроницаемости оборудования – IP22, основной блок нельзя мыть проточной водой, чтобы предотвратить попадание воды внутрь.
2. Остатки дезинфицирующего средства следует тщательно удалить с деталей прибора, чтобы обеспечить безопасное использование прибора в следующий раз.
3. Обязательно очищайте детали прибора после каждого использования. Если детали сильно загрязнены своевременно замените их на новые. Пользователям необходимо выбирать оригинальные аксессуары.
4. При дезинфекции убедитесь, что из резервуара удалены остатки раствора.

6. Предупреждения

1. Храните устройство в чистом и сухом месте. Волокна, пыль и т.д. могут привести к засорению промывочной головки и невозможности распыления. В случае засорения используйте проточную воду для очистки промывочной головки и сопла, чтобы устранить проблему.
2. Используйте оригинальные принадлежности и детали, поставляемые производителем.
3. Устройство может быть повреждено при воздействии очень высокой температуры (например, в микроволновой печи или плите) или очень низкой температуры (например, в холодильнике).
4. Устройство может быть повреждено при сильном ударе. В случае возникновения повреждений свяжитесь с дистрибьютором или производителем.
5. Храните прибор в месте, недоступном для детей и домашних животных, чтобы избежать несчастных случаев.
6. Если устройство используется после хранения при самой высокой или самой низкой допустимой температуре, его следует оставить при комнатной температуре на полчаса перед использованием.

Примечание:

- 1) *Для очистки или дезинфекции устройства запрещается использовать дезинфицирующие средства или детергенты, содержащие бензол, разбавители или легковоспламеняющиеся химикаты.*
- 2) *После использования или во время очистки и дезинфекции убедитесь, что устройство выключено и отсоединено от источника питания.*
- 3) *Бережно храните мелкие принадлежности, такие как крышка, насадка для носа и сопло.*

7. Гарантийные обязательства

1. При соблюдении правил хранения и эксплуатации, если устройство перестает нормально работать в течение 1 года с даты покупки устройства обратитесь к дистрибьютору или производителю.
2. Устройство не подлежит ремонту пользователями. Всеми ремонтными работами должен заниматься технический отдел/персонал, уполномоченный производителем. В течение гарантийного срока все неисправные компоненты могут быть отремонтированы и заменены бесплатно. Гарантия не распространяется на все неисправности, вызванные ненадлежащим использованием прибора.

8. Расшифровка символов с упаковки и этикетки

Символ	Расшифровка
	Номер партии
	Ограничение по температуре использования
	Производитель
	Беречь от воды
	Дата изготовления
	Сертификация CE
	Вкл. / выкл. питания
	Ограничение по влажности
	Ограничение атмосферного давления
	Водонепроницаемость второго класса
	Беречь от солнца
	Не выбрасывать с бытовым мусором
	Предупреждение
	Осторожно

9. Комплект поставки

Наименование	Количество
Основной блок	1
Насадка для носа	2
Сопло-распылитель	1
Крышка	1
Резервуар для раствора	1
USB-кабель	1
Инструкция по эксплуатации	1



FEELLIFE HEALTH INC.

Room 1903, Building A, No.9 Furong Road, Tantou
Community, Songgang Subdistrict, Bao'an District,
Shenzhen, 518104 Guangdong, P.R. China

TEL: +86 755-66867080

E-mail: info@feellife.com

Website: <http://www.feellife.com>

Импортер в РФ:

ООО « СинерМед»

117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская,
д.49, а/я 15

тел.: +7 (495) 718-75-91

E-mail: sales@synmed.ru