

## УХОД И ГИГИЕНА

Пикфлоуметр необходимо очищать минимум 1 раз в неделю при помощи любой чистящей жидкости. Чтобы удалить загрязнения, прибор необходимо поместить в моющий раствор минимум на 30 минут, затем промыть прибор чистой водой. Также можно мыть пикфлоуметр в посудомоечной машине при температуре до +65°C.

**УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПРИБОР ПОЛНОСТЬЮ ВЫСОХ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО.**

Для очистки пикфлоуметра можно использовать спиртовые салфетки, при этом особо тщательно нужно очищать мундштук. При явном загрязнении пикфлоуметр использовать нельзя.

### Использование одним пациентом в домашних условиях:

Пикфлоуметр необходимо очищать минимум 1 раз в неделю.

Не использовать прибор дольше 3 лет!

### Использование в клинике (требуется одноразовый мундштук с адаптером):

После каждого пациента необходимо очистить пикфлоуметр. Для каждого пациента нужно использовать новый одноразовый мундштук или бактериальный фильтр. Рекомендуется замена пикфлоуметра после одного года использования или после 650 пациентов.

### ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора!

- Не пытайтесь разобрать прибор, это может привести к тому, что пикфлоуметр будет показывать неправильные результаты!
- Если пикфлоуметр был поврежден, его нужно заменить.
- Храните устройство в сухом и чистом месте.

### ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

Пикфлоуметр Vitalograph имеет гарантию один год.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Точность:  $\pm 10$  L/min или  $\pm 10\%$  показаний  
Воспроизводимость:  $\pm 10$  L/min или  $\pm 5\%$  показаний  
Диапазон измерений: 50–800 L/min  
Условия использования:  
Температура воздуха 10–40°C

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Температура: 0–50°C  
Относительная влажность воздуха: 10–95%

**Vitalograph®**  
Your respiratory partner

## Пикфлоуметр VITALOGRAPH с принадлежностями

Для наблюдения за функцией дыхания  
(пиковая скорость выдоха)

Артикул 031G3982

Рег.уд. №ФСЗ-2008/02179

CE  
0086

**Vitalograph (Ireland) Ltd.,**  
Gort Road Business Park, Ennis, Clare, Ireland  
e-mail: sales@vitalograph.ie  
Tel: (065) 686 41 00

Уполномоченный представитель в РФ:  
**ООО «ПАРИ синергия в медицине»**  
117418, г. Москва, а/я 16  
Тел.: +7(495)718-75-91  
e-mail: sales@parinebuliser.u

**Vitalograph®**  
Your respiratory partner

*my PEF*

ПИКФЛОУМЕТР

Прибор для индивидуальных ежедневных наблюдений за патологическими состояниями дыхательных путей



